


Let op: deze instructie geldt voor interne orders vanuit Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

Dinsdag 1 november 2022 neemt het Maasstadlab (KCL) de zogenaamde track in gebruik. De afnamebuisen worden vanaf die datum door de track afgehandeld. Etiketten worden daarbij door de track “gelezen”.

Hierbij is het belangrijk dat de etiketten op de juiste manier aangebracht worden:

- Verticaal plakken.
- Recht plakken.
- Ca. 0,5 cm onder de dop.
- De inhoud van de buis moet vanaf de zijkant zichtbaar blijven. Plak het afname-etiket dus over het reeds aanwezige etiket heen.
- Het etiket moet rondom goed vastgeplakt zitten. (Geen loszittende “oortjes” dus!)
- Op de buis **en** dop geen (extra) etiketten plakken.

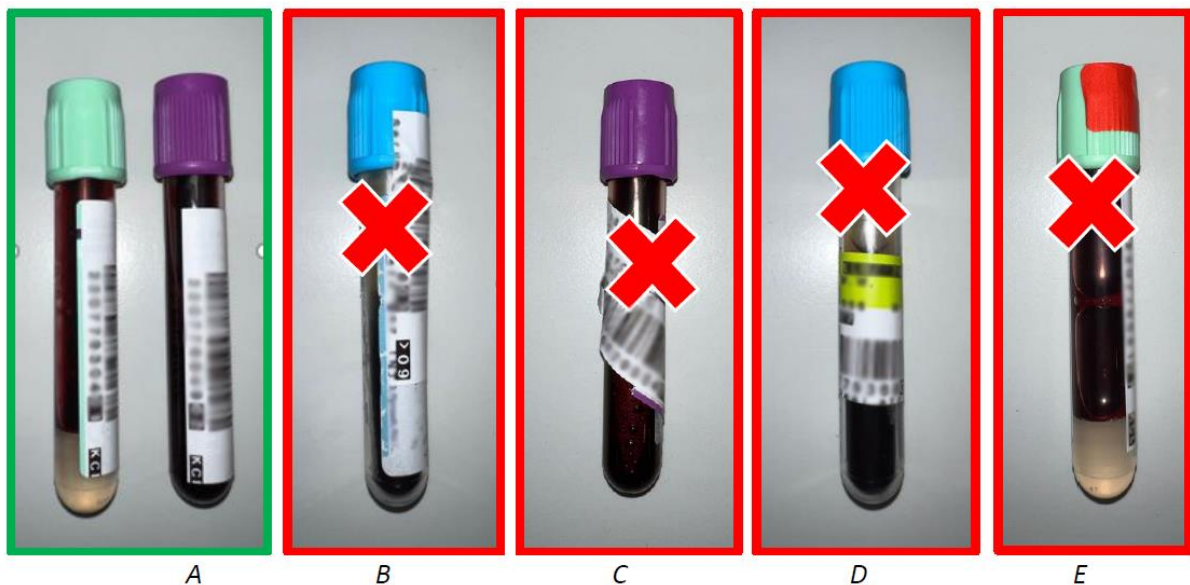

- A. **Perfect!** Het etiket is zowel verticaal als recht geplakt, zit ca. 0,5cm onder de dop en de zijkant is goed zichtbaar 😊
- B. **Onjuist geëtiketteerd:** het etiket is over de dop geplakt en heeft loszittende oortjes 😞
- C. **Onjuist geëtiketteerd:** het etiket is scheef geplakt 😞
- D. **Onjuist geëtiketteerd:** het etiket is horizontaal en de zijkant is niet meer zichtbaar 😞
- E. **Onjuist geëtiketteerd:** er is een extra etiket op de dop geplakt 😞

Doppen van afnamebuisen:

- Haal **NOOIT** de dop van de afnamebuis. Wordt dat wel gedaan dan gaat de buis namelijk lekken in de track met alle gevolgen van dien!
- Buis en kleur dop moeten overeenkomen met de buissoort op het etiket.

Door de track kunnen de monsters sneller verwerkt worden. Als u de bovenstaande aanwijzingen goed opvolgt, dan maken we de zorg weer net een beetje beter!